



DAX Ytdesinfektion Plus

Desinfektion



DAX Ytdesinfektion Plus består av ca 45 vol% isopropylalkohol samt tensid (smutslösande) och är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbriksar, bänkar och bord. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och höljeförsedda virus som t.ex. Corona, Hepatit b & C samt HIV. Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår på den behandlade ytan.

Mikrobiologisk information:

EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek

EN13697 (baktericidal/jästicidal effekt) 60 sek

EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek

EN14476 (Vacciniavirus/höljeförsedda virus) 30 sek, (Adenovirus 5 min)

EN14348 (mycobactericidal effekt) 60 sek

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Användningsområde Lämplig för ytdesinfektion inom hälso- och sjukvården, tandvården eller djursjukvården.

Produktegenskaper Består av ipa och har 45 volymprocent alkoholstyrka
Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan
Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas
God upplösande effekt på t.ex. spill av blod

Bruksanvisning Används på ytor som tål alkohol. Tillsatsen av tensid gör att ytan inte behöver rengöras först.
Innehåller inte castor oil.

Gör så här:

1. Spruta rikligt på ytan alternativt dränk in en torkduk med utspädd vätska.
2. Bearbeta ytan upprepade gånger under minst 30 sek (se etiketten för kontakttider)
3. Lämna ytan att lufttorka

Sammansättning	Aktiva ämen	Effekt
	Isopropanol	45vol% Med tensid

Förvaring Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion.

Tillverkningsland DANMARK

Förpackningsvolym / Transport krt.
Artikelnr.

Artikelnr.

GTIN

12 x 1 l	468-12	7331964004685
----------	--------	---------------

3 x 5 l	469-3	7331964004692
---------	-------	---------------

24 x 300 ml	461-24	7331964004616
-------------	--------	---------------

Ytterligare
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.