



ASSEMBLY INSTRUCTION FOR FACE SHIELD



Step 1
Remove the protective film from the transparent sheeting.
Note: There may be nearly invisible film on both sides.

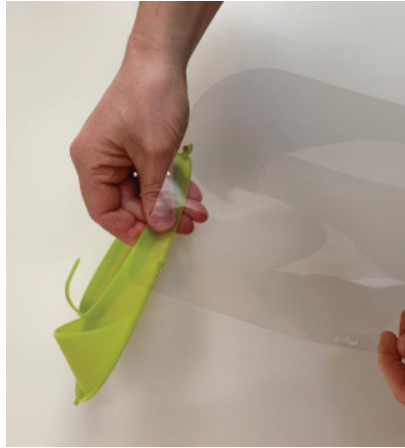

Step 2
Hold the sheeting at a 90 degree angle and attach it to the left side of the visor.

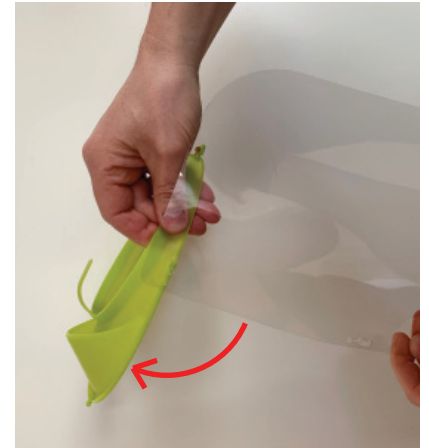

Step 3
Rotate the sheeting.



Step 4
Attach the other side of the sheeting to the visor.
To adjust the angle of the sheeting, use the top, middle or bottom hole on the left and right side.



Step 5
Mount the center of the sheeting to the center of the visor.



Step 6
Attach the rubber band to the back.



Step 7
The face shield is ready for use.

Technical information

Transparent sheeting

- Clean with soapy water and a microfiber cloth.
- Handles up to 60 degrees of heat.

Dimensions

- H: 250mm
- W: 164mm
- D: 230mm

Weight

- 75 grams / 2.6 oz

Denna bruksanvisning skall göras tillgänglig för varje användare.

This manual should be available to each user.



BRUGSANVISNING – IFU

Denna bruksanvisning skall göras tillgänglig för varje användare. This manual should be available to each user

Förvaring

Förvara produkterna i kartong fram till användning. Vid förvaring i emballaget håller produkten 36 månader. Produkten skall ej förvaras i direkt solljus eller i hög värme.

Avsedd användning

Produkten är avsedd att skydda mot droppsmitta.

Daglig användning

Rengöring av visir görs bäst med mikrofiberduk, vatten och tvål. Tvål med slipmedel kommer repa visiret. Visiren kan rengöras med alkoholbaserade produkter liknande Isopropanol, etanol och desinfektionsmedel. Undvik långvarig rengöring eller exponering med alkoholbaserade produkter. Det kan påverka transparensen av visiret.

Vassa produkter såsom knivar, rakblad m.m. kan repa visiret och då påverka sikten.

Följ bifogad monteringsinstruktion när visir monteras. När skyddsplast är avtagen bör visiret monteras direkt på hållare för att undvika repor/skador på ytan.

Undvik hårda stötar och slag mot visiret.

Visiret är tänkt att användas i rumstemperatur.

Produkten kan användas flera gånger.

Begränsningar i användandet

Visiret skyddar inte mot ånga som kan komma in under visiret.

Visiret renar inte inandningsluft.

Upprepad användning av desinfektionsmedel kan ge visiret en matt yta.

Visiret är inte tänkt att användas som skydd mot stötar/slag.

Produkten är inte avsedd för att steriliseras.

Hållbarhet

Produkten kan användas vid upprepade tillfällen tills visiret får en matt eller repad yta. Då skall produkten kasseras. Produkten skall ej förvaras i direkt solljus eller i hög värme.

Vid normal användning kan produkten användas drygt ett år.

Ompackning/distribution

Produkten skickas i 60-pack i befintligt anpassat emballage. Skall produkten skickas vidare så rekommenderas att använda befintligt emballage alternativt packa om i stötdämpande emballage.

Denna bruksanvisning skall göras tillgänglig för varje användare. Även monteringsinstruktionen skall göras tillgänglig för varje användare.

Märkning

Produkten är märkt enligt 1 S -EN 166 3 S. CE-märkning inkluderar endast Ide-Pro-skärm och huvudband.

Ide-Pro = tillverkare

1 = produktens optiska klass

EN 166 = Aktuell standard/metod

3 = skydd mot vätska och stänk

S = ökad robusthet

Produktkrav

Produkten uppfyller kraven i PPER (EU) 2016/425.

Tester

Produkten är testad enligt EN 166.

Kontroll av produkt

EU-typkontrollen är genomförd av RISE Research Institutes of Sweden B, Box 857, SE-50115 Borås. Anmält organ nr 0402

Harmoniserade standarder

EN 166:2001

EU-försäkran

EU-försäkran om överensstämmelse finns att ladda ner på www.ide-pro.com

Varning

Material som kan komma i kontakt med bärarens hud kan orsaka allergiska reaktioner mot känsliga individer.

Repad eller skadad visir bör bytas ut.

Reservdelar

Extra visir kan beställas från Idé-Pro. Artikelnummer 6645346.

Denna bruksanvisning skall göras tillgänglig för varje användare. This manual should be available to each user.